



Bruxism Smart Application for Devices

Gentile paziente,

il Bruxismo è un disturbo poco conosciuto, di difficile diagnosi e gestione, per cui serve, oltre ad uno strumento idoneo, la sua massima collaborazione.

BruxApp è un'applicazione dedicata al Bruxismo, unica al mondo, ideata ed utilizzata dai più **importanti esperti internazionali**, come progetto di ricerca epidemiologica del Bruxismo della veglia, ed è stata tradotta in 25 lingue da altrettanti gruppi di ricerca.

Ad oggi, è quindi **l'unico strumento** che le consentirà di conoscere e gestire facilmente questa condizione; allo stesso tempo, il suo dentista potrà eseguire una diagnosi corretta ed una valutazione obiettiva della eventuale presenza del bruxismo della veglia.

Qua troverà poche semplici istruzioni per scaricare l'applicazione

ALERT GIORNALIERI

Alert Diurno

10 15 20 25

DURATA DEL CONTROLLO

Numero di giorni

7 15 30 60


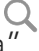
Alert Risveglio

si no



Come scaricare BruxApp


iPhone

- ✓ Selezionare l'icona 
- ✓ Selezionare l'icona "Cerca" 
- ✓ Scrivere: **bruxapp**
- ✓ Troverà la pagina di BruxApp
- ✓ Una volta scaricata **è indispensabile autorizzare le notifiche di BruxApp**, ma non le arriverà alcun tipo di notifica pubblicitaria.



Compatibilità da iPhone 5 e superiori iOS 9.3 e superiori

Android

- ✓ Selezionare l'icona  Google Play
- ✓ Nella barra di ricerca in alto scrivere: **bruxapp**
- ✓ Troverà la pagina di BruxApp
- ✓ Una volta scaricata, **è indispensabile utilizzare questi due settings:**
 - In "Autorizzazioni App" deve essere attivata l'archiviazione dei dati di BruxApp
 - Il "risparmio energetico" della batteria deve essere disattivato.



Compatibilità con Android 6 e superiori

Può esportare i dati (anonimi e non sensibili) a questo indirizzo e-mail:

oppure via WhatsApp al n°: _____

Per maggiori informazioni sul Bruxismo e sul corretto utilizzo di BruxApp visiti il sito

WWW.BRUXAPP.INFO